

CONTENUTO

- La confezione contiene tutto il materiale necessario per l'esecuzione di due test:
- Due (2) Sacchetti di alluminio sigillati contenenti ciascuno un (1) dispositivo First To Know® e una bustina essiccante (Dispositivo Medico - Diagnostico in Vitro conforme alla normativa 98/79/CE) **CE 0072**
 - Tre (3) Pungidito monouso sterili prodotti dalla Owen Mumford Ltd. (Dispositivo Medico conforme alla normativa 93/42/CE) **CE 0120**
 - Due (2) Salviettine disinfettanti prodotte dalla Gerno Spa Italia (Presidio Medico Chirurgico) **Reg. Min. Sal. n° 12671**
 - Due (2) Cerotti prodotti dalla Eurofarm Spa Italia (Dispositivo Medico conforme alla normativa 93/42/CE) **CE**
 - Istruzioni per l'uso

Materiale necessario ma non fornito:


- Orologio o Cronometro

NOTA:
leggere attentamente questo foglio illustrativo prima di eseguire il test.

L'esecuzione del test è semplice, tuttavia risulta ancora più facile se si esegue correttamente la fase di caricamento del campione (goccia di sangue) nel dispositivo.


In particolare bisogna fare attenzione che:

- Il campione raggiunga la linea di riempimento
- L'area di riempimento sia completamente piena di campione.

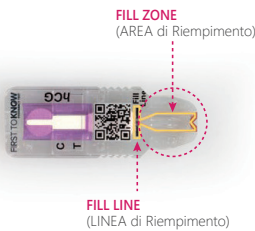

NOTA:
Il flusso del sangue è importante, quindi ricordarsi di:

- Avere le mani calde
- Stare in piedi
- Tenere le mani ad un livello più basso rispetto al petto

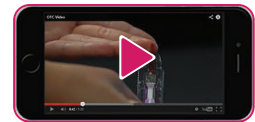

CODICE QR
Utilizzare questo codice QR per un rapido accesso al video.

PREPARAZIONE

NOTA:
Il dispositivo deve essere utilizzato senza indugio dopo averlo estratto dal sacchetto.

NOTA:
Un errore frequente è quello di pigiare il pulsante di attivazione dell'ago durante la rimozione del tappo. In questa fase si sta solo rimuovendo il tappo.

Il pulsante di attivazione bisogna pigiarlo dopo.

Se il pulsante di attivazione viene pigiato involontariamente prima di eseguire la puntura il pungidito diventa inutilizzabile perché è provvisto di un meccanismo che mette automaticamente in sicurezza l'elemento pungente dopo la prima attivazione.

4 PULIZIA DEL POLPASTRELLO

Scegliere il dito da pungere. Si consiglia il dito medio della mano. Pulire il polpastrello del dito scelto con la salviettina disinfettante contenuta nella confezione.



NOTA:
Per il corretto utilizzo della salviettina disinfettante leggere le istruzioni riportate sul retro della propria confezione.

5 MASSAGGIARE PALMO E DITO

Massaggiare il palmo della mano delicatamente in direzione del dito scelto per la puntura. Premere sul palmo per far fluire il sangue alla base del dito, poi massaggiare dalla base del dito verso la punta.



1 LAVARE LE MANI

Lavare accuratamente le mani con acqua tiepida e sapone per circa un minuto e asciugarle.



2 RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DAL SACCHETTO SIGILLATO

Aprire il sacchetto di alluminio sigillato che contiene il Test, estrarre il dispositivo e adagiarlo su un tavolo. Lasciare l'essiccante nella confezione.



3 PREPARARE IL PUNGIDITO

Tenendo il pungidito dai lati ruotare il tappo grigio 5-6 volte e poi estrarlo delicatamente verso l'esterno per rimuoverlo. **NON PIGIARE ANCORA IL PULSANTE DI ATTIVAZIONE DELL'AGO**



ESECUZIONE DEL TEST

Per eseguire il test è necessario:

- Un (1) Dispositivo First To Know® contenuto nel sacchetto sigillato
- Un (1) Pungidito monouso sterile
- Una (1) Salviettina disinfettante
- Un (1) Cerotto

NOTA:
Il test può essere eseguito nel luogo che si preferisce, l'importante è avere a disposizione una superficie orizzontale per poter adagiare il materiale necessario ed evitare luoghi che possono indurre distrazione.

6 PALMO IN ALTO

Per aiutare a tenere la mano ferma mettersi in piedi ed appoggiare la mano, con il palmo rivolto verso l'alto, su una superficie piana.



7 DOVE PUNGERE

Posizionare il pungidito contro il polpastrello scelto in una posizione leggermente decentrata, dal lato rivolto verso il mignolo, come illustrato nell'immagine. Non posizionare il pungidito al centro o troppo a lato del polpastrello



9 FORMAZIONE GOCCIA DI SANGUE

Massaggiare il dito dalla base verso l'estremità in direzione della puntura finché non si forma una goccia di sangue. Comprimerne sotto la punta del dito per favorire la produzione di una goccia di sangue abbondante. Non premere direttamente l'area incisa.



8 PUNTURA DEL POLPASTRELLO

Premere saldamente il pungidito contro la zona da pungere. Più si preme meno si sente la puntura. Premere il pulsante di attivazione dell'ago.



10 PRELEVARE LA GOCCIA DI SANGUE

Posizionare delicatamente la punta del dispositivo sulla goccia di sangue fino a quando l'area di riempimento sarà piena.



NOTA:
È frequente dover ripetere i passaggi 9 e 10 più di una volta per ottenere una quantità sufficiente di sangue per riempire l'area di riempimento.

Posizionare delicatamente la punta del dispositivo sulla goccia di sangue.



Produrre un'altra goccia di sangue.



Ripetere fino a quando l'area di riempimento sarà piena di sangue.

11 BATTERE DUE VOLTE IL DISPOSITIVO

Quando l'area di riempimento è piena tenere il dispositivo in posizione verticale con la punta rivolta verso l'alto e batterlo due volte su un tavolo o su una superficie solida; poi adagiarlo in posizione orizzontale su una superficie piana. Applicare il cerotto, incluso nella confezione, se necessario.

BATTERE PER 2 VOLTE



LETTURA DEI RISULTATI



Dopo aver posizionato il dispositivo orizzontalmente su una superficie piana attendere 10 minuti. **Il risultato deve essere letto dopo 10 minuti.** Il risultato non è più accurato se letto dopo 30 minuti.

LINEE "C" e "T"
Nell'area di lettura del dispositivo ci sono due zone "C" e "T" nelle quali possono essere visualizzate due linee.

"C" linea di controllo: indica se il test è stato eseguito correttamente


"T" linea del test: indica se il test è Positivo o Negativo




RISULTATO POSITIVO "INCINTA"
La presenza di linee colorate di qualsiasi intensità in ENTRAMBE le zone "C" e "T" indica un risultato Positivo, incinta. L'intensità del colore delle linee può variare, anche una debole colorazione indica un risultato Positivo, incinta.



RISULTATO NEGATIVO "NON INCINTA"
La presenza di una linea colorata nella zona "C" e nessuna linea colorata nella zona "T" indica un risultato negativo. È fortemente probabile che non si è incinta.

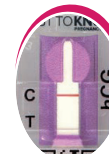

RISULTATO NON VALIDO
Se entro 10 minuti nella zona "C" non appare alcuna linea colorata o appare solo la linea colorata nella zona "T", significa che il test non è valido e bisogna ripeterlo utilizzando una nuova confezione.

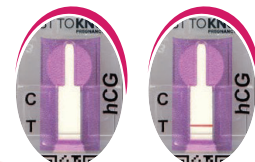

NOTA:
Non prendere alcuna iniziativa personale di carattere clinico sulla base del risultato del test, rivolgersi sempre al medico per qualsiasi dubbio o consulenza clinica.