

INHALT

Die Packung enthält das gesamte Material, das zur Durchführung von zwei Tests benötigt wird:


- Zwei (2) versiegelte Aluminiumbeutel mit jeweils einem (1) First To Know® Gerät und einem Päckchen Trockenmittel (Medizinprodukt – In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79/CE) **CE 0373**
- Drei (3) sterile Einweglanzetten, hergestellt von Owen Mumford Ltd. (Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/CEE) **CE 0120**
- Zwei (2) Desinfektionstücher, hergestellt von Germa Spa Italia (Medizinisch-chirurgisches Präsidium) Registrierung Ital. Gesundheitsministerium Nr. 12671
- Zwei (2) Pflaster, hergestellt von Eurofarm Spa Italia (Medizinprodukt gemäß der Richtlinie 93/42/CEE) **CE**
- Gebrauchsanweisung

Erforderliches, nicht enthaltenes Material:
• Uhr oder Zeitmesser

HINWEIS :
bitte lesen sie diese gebrauchsanweisung vor der durchführung des tests aufmerksam durch

Die Durchführung des Tests ist einfach, wird jedoch zusätzlich erleichtert, wenn die Phase der Befüllung des Geräts mit der Probe (Blutstropfen) korrekt ausgeführt wird. **Insbesondere ist auf Folgendes zu achten:**

- Die Probe **ERREICHT DIE FÜLLLINIE**
- **DER FÜLLBEREICH** ist **VOLLSTÄNDIG** mit der Probe gefüllt.

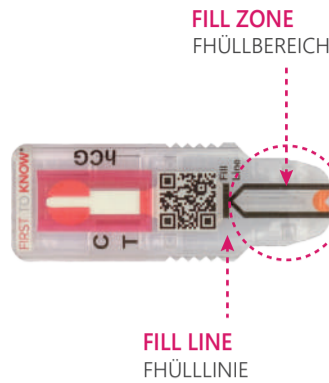

HINWEIS :

HINWEIS: Der Blutfluss ist wichtig, denken Sie daher daran:

- **warme Hände zu haben**
- **zu stehen**
- **die Hände auf einer Höhe unterhalb der Brust zu halten**



VIDEO ANSEHEN



QR-CODE
Mit diesem QR-Code können Sie das Video schnell aufrufen

VORBEREITUNG

1 HÄNDE WASCHEN

Waschen Sie sich die Hände ca. eine Minute lang gründlich mit lauwarmem Wasser und Seife und trocknen Sie sie ab.



2 ENTNAHME DES PRODUKTS AUS DER VERSIEGELTEN PACKUNG

Öffnen Sie den versiegelten Aluminiumbeutel, der den Test enthält, nehmen Sie das Gerät heraus und legen Sie es auf einen Tisch. Lassen Sie das Trockenmittel in der Packung.



HINWEIS :
Das Gerät muss nach der Entnahme aus der Packung unverzüglich verwendet werden

3 VORBEREITUNG DER LANZETTE

Halten Sie die Lanzette an den Seiten, drehen Sie den grauen Verschluss 5- bis 6-mal und nehmen Sie ihn anschließend vorsichtig ab. **DEN AKTIVIERUNGSKNOPF DER NADEL NOCH NICHT DRÜCKEN.**

HINWEIS :
Ein häufiger Fehler besteht darin, den Aktivierungsknopf der Nadel beim Abnehmen des Verschlusses zu drücken.

In dieser Phase darf nur der Verschluss entfernt werden. **Der Aktivierungsknopf muss später gedrückt werden.**

Wenn der Aktivierungsknopf versehentlich gedrückt wird, bevor der Einstich mit der Lanzette erfolgt, kann das Gerät nicht mehr verwendet werden. Das Gerät ist nämlich mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der die Nadel nach der erstmaligen Aktivierung automatisch zurückzieht.

4 REINIGUNG DER FINGERKUPPE

Wählen Sie einen Finger für den Einstich aus. Dazu wird der Mittelfinger der Hand empfohlen. Wischen Sie die Kuppe des ausgewählten Fingers mit dem Desinfektionstuch ab, das in der Packung enthalten ist.



HINWEIS :
Zur richtigen Verwendung des Desinfektionstuchs lesen Sie bitte die Anweisungen auf der Rückseite von dessen Verpackung.

5 MASSIEREN VON HANDFLÄCHE UND FINGER

Massieren Sie die Handfläche sanft in Richtung des für den Einstich ausgewählten Fingers. Drücken Sie auf die Handfläche, um den Blutfluss vom Ansatz bis zur Spitze des Fingers zu fördern, und massieren Sie anschließend den Finger vom Ansatz bis zur Spitze.



DURCHFÜHRUNG DES TESTS

Folgendes wird zur Durchführung des Tests benötigt:

- Ein (1) First-To-Know-Gerät, enthalten im versiegelten Beutel
- Eine (1) sterile Einweglanzette
- Ein (1) Desinfektionstuch
- Ein (1) Pflaster

HINWEIS :
Der Test kann an jedem beliebigen Ort durchgeführt werden, aber es ist wichtig, dass eine horizontale Fläche zur Ablage des erforderlichen Materials vorhanden ist und der Test ungestört durchgeführt werden kann.

7 WO WIRD GESTOCHEN

Positionieren Sie die Lanzette leicht dezentral zum kleinen Finger ausgerichtet auf der ausgewählten Fingerkuppe, wie auf der Abbildung gezeigt. Positionieren Sie die Lanzette nicht in der Mitte oder zu weit auf der Seite der Fingerkuppe.



9 BILDUNG DES BLUTSTROPFENS

Massieren Sie den Finger vom Ansatz bis zur Spitze in Richtung des Einstichs, bis sich ein Blutstropfen bildet. Drücken Sie unterhalb der Einstichstelle auf den Finger, um die Entstehung eines großen Blutstropfens zu fördern. Drücken Sie nicht direkt auf die Einstichstelle.



8 STICH IN DIE FINGERKUPPE

Drücken Sie fest mit der Lanzette auf die Einstichstelle. Je fester Sie drücken, umso weniger spüren Sie den Einstich. Drücken Sie auf den Aktivierungsknopf der Nadel.



10 ENTNAHME DES BLUTSTROPFENS

Setzen Sie die Spitze des Geräts leicht auf den Blutstropfen und warten Sie, bis der Füllbereich voll gefüllt ist.



HINWEIS :
Es kommt häufig vor, dass die Schritte 9 und 10 mehrmals wiederholt werden müssen, um eine ausreichende Blutmenge zum Füllen des Füllbereichs zu erhalten.

SPITZE DES GERÄTS LEICHT AUF DEM BLUT-STROPFEN PLATZIEREN



EINEN WEITEREN BLUT-STROPFEN BILDEN



WIEDERHOLEN bis der Füllbereich vollständig mit Blut gefüllt ist.

11 GERÄT ZWEIMAL AUFSCHLAGEN
Wenn der Füllbereich voll ist, halten Sie das Gerät mit der Spitze nach oben zeigend in einer vertikalen Position und schlagen Sie es zweimal auf dem Tisch oder einer anderen festen Oberfläche auf. Legen Sie das Gerät dann horizontal auf einer ebenen Fläche ab. Bringen Sie bei Bedarf das in der Packung enthaltene Pflaster an.

GERÄT ZWEIMAL AUFSCHLAGEN



ABLESUNG DES ERGEBNISSES



Warten Sie 10 Minuten ab, nachdem Sie das Gerät horizontal auf einer ebenen Fläche abgelegt haben. **Das Ergebnis muss nach 10 Minuten abgelesen werden.** Wenn die Ablesung nach 30 Minuten erfolgt, ist das Ergebnis nicht mehr genau.

„C“-LINIE UND „T“-LINIE
In der Ablesesezone des Geräts befinden sich die beiden Bereiche „C“ und „T“, auf denen zwei Linien angezeigt werden können.

Kontrolllinie „C“: zeigt an, ob der Test richtig durchgeführt wurde
Testlinie „T“: zeigt an, ob der Test positiv oder negativ ist




POSITIVES ERGEBNIS: „SCHWANGER“
Wenn BEIDE Bereiche „C“ und „T“ eine farbige Linie in jeglicher Intensität anzeigen, ist das Ergebnis positiv: Schwanger. Die Farbtintensität der Linien kann variieren, aber auch eine leichte Einfärbung weist auf das positive Ergebnis, „Schwanger“, hin.



NEGATIVES ERGEBNIS: „NICHT SCHWANGER“
Wenn der Bereich „C“ eine farbige Linie anzeigt, aber der Bereich „T“ keine farbige Linie enthält, ist das Ergebnis negativ. Sie sind höchstwahrscheinlich nicht schwanger.



UNGÜLTIGES ERGEBNIS
Wenn sich innerhalb von 10 Minuten keine farbige Linie im Bereich „C“ bildet oder nur eine Linie im Bereich „T“ erscheint, ist der Test ungültig und muss mit einer neuen Packung wiederholt werden.

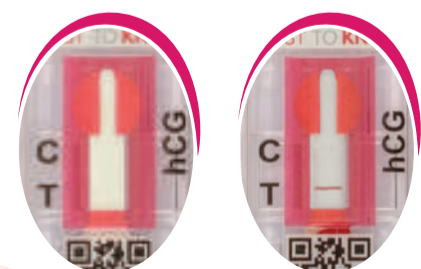

HINWEIS :
Unternehmen Sie keine Maßnahmen klinischer Art auf Grundlage des Testergebnisses in Eigeninitiative. Wenden Sie sich bei Zweifeln oder zur klinischen Beratung immer an einen Arzt.